

Produktdaten

Artikelbezeichnung	:	PP-Urinflasche für Frauen (unsteril)
Artikelnummer	:	7050071
GTIN/EAN	:	4260271583770
Zolltarifnummer	:	3924 9000 00
Farbe	:	milchig-transparent mit weißem Deckel
Abmessung	:	265 mm (L) x 87 mm (B) x 115 mm (H)
Fassungsvermögen	:	ca. 1.000 ml
Anzahl / Karton	:	48 Stück
Unterverpackung	:	einzelnd verpackt in PE-Beutel
Material Flasche	:	Polypropylen (PP) - hitzebeständig bis 130°C
Material Deckel	:	Polyethylen (PE) - hitzebeständig bis max. 80°C
Qualitätskontrolle	:	permanente Kontrollen während der Produktion Endkontrolle vor Verschiffung Rückverfolgbarkeit anhand LOT-Nummer Wareneingangskontrolle durch WMC

logistische Daten

Kartonabmessung	:	590 x 325 x 620 mm
Menge / Palette	:	12 Karton à 48 Stück = 576 Stück
Menge / Lage	:	4 Karton
Kartongewicht	:	± 5,78 kg



Die Daten beschreiben ausschließlich produktrelevante Daten und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Stand: 29.02.2024 | BN

Aufbereitung : Die Urinflaschen sollten nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden. Dies kann manuell oder maschinell durchgeführt werden, wobei die maschinelle Reinigung zu bevorzugen ist.
(maschinell vor manuell)

Bei der manuellen Reinigung sollte die Flasche mittels einer dafür vorgesehenen Urinflaschenbürste gereinigt und im Nachgang mit einem geeigneten Desinfektionsmittel von außen und innen desinfiziert werden. Das Innere der Flasche kann mit einer entsprechenden Desinfektionslösung aufgefüllt werden. Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Anwendungsvorschriften des Herstellers zu beachten. Insbesondere vorgegebene Desinfektions- bzw. Einwirkzeiten sind strikt einzuhalten. Während des manuellen Aufbereitungsvorgangs sind vom durchführenden Personal zwingend Handschuhe zu tragen. Nach der Aufbereitung mit einem weichen, fusselfreien Tuch trockenreiben.

Die maschinelle Aufbereitung sollte in einem Steckbeckenspülautomat erfolgen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialbeschaffenheit sollten Deckel und Flasche getrennt voneinander aufbereitet werden. Bei diesem Vorgang wird die Urinflasche gereinigt und je nach vorhandenem Gerät gleichzeitig thermisch oder chemo-thermisch desinfiziert. Die maximal anwendbare Temperatur zur thermischen Aufbereitung der PP-Urinflasche liegt bei 130°C. Der PE-Deckel kann bei maximal 80°C aufbereitet werden. Zur einwandfreien Reinigung/Desinfektion bitte die Bedienungsanweisungen des Geräteherstellers befolgen.